
Renuzyme Plus

Especificaciones del producto

GETINGE
GETINGE GROUP

Descripción del Producto

Renuzyme Plus es una fórmula de doble enzima que proporciona limpieza adicional en temperaturas más bajas.



A Getinge Green Product

Aplicación

Diseñado para suciedades severas, aplicaciones con agua fría, y cuando se requieren tiempos más cortos de contacto/enjuague. Los productos colocados en tanques de remojo, en ultrasonidos, o que son lavados manualmente, se benefician de la fórmula de dos enzimas. Para su uso en lavaderos, baños ultrasónicos, lavadoras y desinfectoras de carros.

Características Principales

- Penetra y descompone la proteína y la materia orgánica
- Elimina rápida y eficazmente la sangre, los tejidos, mucosas y otras suciedades proteicas
- Efectivo en agua dura o blanda
- Detergente de pH neutro
- No mancha los instrumentos o los equipos hechos de vidrio, metal, plástico o de goma

Instrucciones de Uso Direcciones

Limpieza manual: uso use 8 -16 ml/L de agua. Deseche la solución de lavado cuando esté visiblemente sucia.
Limpieza automática: Uso Use 2 -16 ml/L de agua en el ciclo de prelavado. Siga siempre las instrucciones del fabricante de la máquina a utilizar. La cantidad de producto a utilizar varía dependiendo de la calidad del agua. Este producto es más efectivo a temperaturas entre 21°-60°C. Si tiene dudas adicionales, consulte a su representante Getinge.

- No agregue lejía, detergentes o cualquier otro producto químico a este producto. Los químicos que añada pueden destruir la efectividad de este detergente.
- Algunos plásticos y cauchos no son compatibles con los detergentes o las altas temperaturas del agua. Consulte con el fabricante para determinar su idoneidad.

Propiedades Físicas y Químicas

- Líquido claro, verde y delgado
 - Fragancia a manzana verde
 - Valor de pH: 6,0-8,0
-

Aviso

Sólo para uso institucional e industrial. No es para uso en el hogar. Referirse a la MSDS para obtener más información con respecto a la seguridad, la manipulación y el almacenamiento y los métodos de eliminación de residuos.

Información Sobre Pedidos

Teléfono: 800.950.9912

Fax: 800.950.2570

Descripción / Número de catálogo

4 x 3.7 litros
61301605269

18.5 litros
61301600089

55.5 litros
61301600090

111 litros
61301602690

203.5 litros
61301601308

GETINGE

GETINGE GROUP

www.getingegroup.com

Maquet do Brasil Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
01140-130 São Paulo
Brasil
Phone: +55 11 2608-7409
Fax: +55 11 2608-7359
maquetdobrasil@maquet.com

GETINGE GROUP

Getinge Group is a leading global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We operate under the three brands of ArjoHuntleigh, Getinge and Maquet. ArjoHuntleigh focuses on patient mobility and wound management solutions. Getinge provides solutions for infection control within healthcare and contamination prevention within life sciences. Maquet specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions, interventional cardiology and intensive care.