
Renuzyme Espuma En Spray

Especificaciones del producto

GETINGE
GETINGE GROUP

Descripción del Producto

Renuzyme espuma en spray es un producto listo para usar, para el pre tratamiento de los instrumentos, listo para usar.



A Getinge Green Product

Aplicación

Para los procedimientos de limpieza manual y el remojo de los instrumentos. No debe utilizarse en lavadoras desinfectoras.

Características Principales

- Mejora la eficacia del proceso de limpieza, incrementado el tiempo de contacto con la superficie contaminada
- Impide el secado de las superficies sucias antes de la descontaminación
- Efectivo a temperatura ambiente
- No mancha el vidrio, el metal, el plástico o los equipos
- Agradable fragancia a manzana verde

Instrucciones de Uso Direcciones

Utilice a temperatura ambiente. Rocíe directamente sobre las áreas sucias. Aplique más producto en las áreas más sucias o como sea necesario para evitar el secado. Asegure un contacto mínimo con el producto durante al menos 2 minutos. Enjuague los artículos antes de iniciar los procedimientos de descontaminación. Si tiene preguntas adicionales, consulte a su representante de Getinge.

- No agregue lejía, desinfectantes, detergentes u otros productos químicos a este producto. Añadir un producto químico puede destruir la eficacia de este limpiador.
- Algunos plásticos y cauchos no son compatibles con los detergentes o las altas temperaturas del agua. Consulte con el fabricante para determinar su idoneidad.

Propiedades Físicas y Químicas

- Claro, de color ocre claro
 - Fragancia a manzana verde
 - Valor de pH: 9-10
-

Aviso

Sólo para uso institucional e industrial. No es para uso en el hogar. Vea el MSDS para obtener más información sobre seguridad, manejo y métodos de almacenamiento y eliminación de residuos.

Información Sobre Pedidos

Teléfono: 800.950.9912

Fax: 800.950.2570

Descripción /
Número de catálogo

12 botellas de 946ml
61301604584

GETINGE
GETINGE GROUP

www.getingegroup.com

Maquet do Brasil Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
01140-130 São Paulo
Brasil
Phone: +55 11 2608-7409
Fax: +55 11 2608-7359
maquetdobrasil@maquet.com

GETINGE GROUP

Getinge Group is a leading global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We operate under the three brands of ArjoHuntleigh, Getinge and Maquet. ArjoHuntleigh focuses on patient mobility and wound management solutions. Getinge provides solutions for infection control within healthcare and contamination prevention within life sciences. Maquet specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions, interventional cardiology and intensive care.